


## Istruzioni per l'uso

### Step 1: Prelievo di sangue


Eeguire un prelievo di sangue in vena utilizzando il protocollo standard. La provetta fornita contiene un additivo per aiutare a preservare il campione.

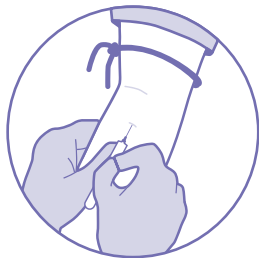

## Istruzioni per l'uso

### Step 2: Miscelare la Soluzione

Quando il prelievo di sangue è completato, mescolare accuratamente invertendo 10 volte.

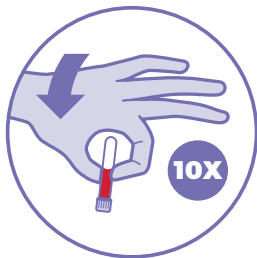

### Step 3: Garantire il funzionamento del campione

Dopo la raccolta, trasportare e conservare la provetta a temperatura compresa tra 6 ° C e 37 ° C. **NON CONGELARE.** Spedire immediatamente e non oltre 1 giorno dopo la raccolta del campione. Si consiglia di spedire ad inizio settimana per evitare il week-end. Il mancato rispetto di queste linee guida può comportare la necessità di un ricampionamento e un ritardo nell'emissione del risultato del test.



#### Step 4: Completare il modulo di richiesta per il test

Completare e firmare il **modulo di richiesta del test** incluso nel kit. Assicurarsi di includere tutte le informazioni, compreso il codice a barre del kit e il proprio indirizzo email, per ricevere il referto coi risultati. Informazioni mancanti o illeggibili ritarderanno i risultati. **Non scrivere sulla provetta.** Il codice a barre della provetta è tutto ciò che serve per identificare la parte testata.

#### Step 5: Impacchettare e spedire

Inserisci la provetta di raccolta nel piccolo sacchetto di plastica richiudibile fornito nel kit e sigillalo. Posiziona con cura il sacchetto contenente il campione all'interno della schiuma protettiva in dotazione, quindi inserisci sia il sacchetto che la schiuma nella scatola del kit. Scansiona o fotografa il modulo di richiesta del test compilato e inviacelo via email prima di spedire i campioni.

Se hai acquistato il servizio di ritiro, organizzeremo la raccolta del pacco tramite Federal Express e la spedizione diretta al laboratorio. In caso contrario, se utilizzi il tuo corriere, assicurati di dichiarare il contenuto come segue: "Commerciale - 'Campione Umano Esente' secondo IATA 3.6.2.2.3.6 Fluido Tissutale, non infettivo, esclusivamente per scopi di analisi" con un valore dichiarato di \$1.

Se nel kit non è presente una busta prepagata, contattaci via email per confermare l'indirizzo di spedizione dei campioni.